

Datenblatt

FFP2 Masken

ExoVir

-Natur Hautnah-

Partikelfiltrierende Halbmasken aus Niedersachsen

Produktinformation FFP2 NR Model 88 (Bambus)

MERKMALE



Made in Germany



angenehm weich auf der Haut
mehr Komfort bei gleichem
Schutz



von Natur aus hypoallergen
und antibakteriell sowie
geruchsabweisend



vegane Materialien



weniger Kunststoff

ZERTIFIZIERUNG

Die Masken der Serie FFP2 Klassiker erfüllen die EN 149:2001 + A1:2009 und tragen das CE-Zeichen in Bezug auf die EG-Richtlinie 89/686/EEC.

EU-Baumusterprüfbescheinigung: www.drqauss.de

MATERIAL

Innen- und Außenschicht: 100% Bambus (Bio);
Zwischenschicht: Meltblown, Polypropylen

Bebänderung: elastisches Gummiband

Nasclip: Kunststoff und leicht biegsamer Draht

GEWICHT

5 gr.

EINSATZBEREICHE

Gesundheitsschädliche Stäube auf Wasser- und Öl Basis, Biologische Arbeitsstoffe der Risikogruppe 2



Datenblatt

FFP2 Masken

EX^oVir

-Natur Hautnah-

Partikelfiltrierende Halbmasken aus Niedersachsen

PRÜFUNG NACH EN 149:2001 + A1:2009

Gesamtleckage

Zehn Testpersonen, die eine Atemschutzmaske tragen, führen auf einem Laufband unterschiedliche Übungen aus.

Das Testergebnis darf nicht über folgenden Werten liegen:

Klasse FFP2

Max. Gesamtleckage 8%

Der maximale Filterdurchlass darf nach 120 mg Einspeicherung von Paraffinöl analog der EN 49:2001 + A1:2009 folgende Werte nicht überschreiten:

Klasse FFP2

Max. Filterdurchlass 6%

Entflammbarkeit

Mit einer Geschwindigkeit von 6 cm/s werden vier Atemschutzmasken durch eine Flamme von 800°C (+/- 50°C) geführt. Die Atemschutzmaske darf nicht mehr brennen, nachdem sie aus der Flamme genommen wurde.

Atemwiderstand

Der vom Filter der Atemschutzmaske erzeugte Atemwiderstand wird bei einem Luftstrom von 30 l/min und 95 l/min gemessen.

Max. Atemwiderstand gemäß EN 149

30 l / min	95 l / min
0,7 mbar	2,4 mbar

GEBRAUCHSANWEISUNG

Die Maske ist sofort zu wechseln, wenn sie beschädigt ist oder der Atemwiderstand ansteigt. Grundsätzlich zu wechseln. Trocken und vor Sonnenlicht geschützt lagern. Niemals Veränderungen an der Maske vornehmen.

ANWENDUNG



1. Greifen Sie die seitlichen Bänder und ziehen Sie diese über die Ohren.
2. Ziehen Sie den unteren Teil der Maske über Mund und Kinn.
3. Den Draht an die Form der Nase anpassen.
4. Berühren Sie beim Tragen nicht die Vorderseite der Maske.

Mengen- und Verpackungsvarianten

Artikelnr.	PZN (ab 10.21)	Verpackungseinheit
88-002	17576520	2 Stück
88-005	17576514	5 Stück

Hersteller

Gauss PSA GmbH, Neuer Weg 47B, 38302
Wolfenbüttel

www.drgauss.de